

唾液採取方法のご説明『50 mL遠沈管を使用する場合』

AVSS Co., Ltd.

《注意事項～その1～》



唾液採取30分前から、飲食、喫煙、歯磨き、口内洗浄は控えてください。

《注意事項～その2～》

『50 mL遠沈管』と『チャック付ポリ袋』がお手元にあることをご確認ください。




50 mL遠沈管



チャック付ポリ袋


《注意事項～その3～》

採取前にラベルを貼ってください。同じ番号のラベルを台帳に貼り、その患者様の氏名を記入し、後で番号と患者様が追跡できるようにしてください。

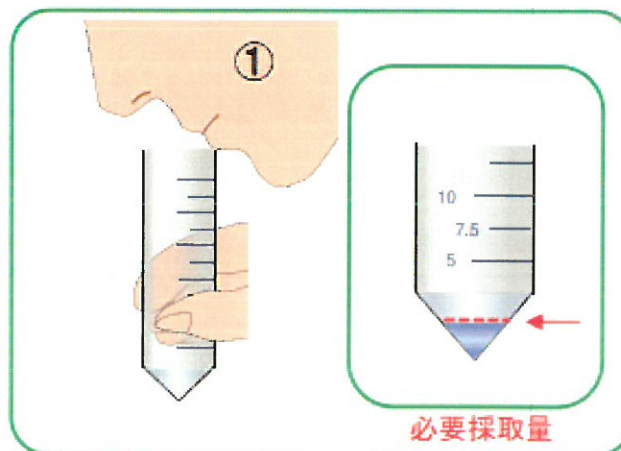

① 容器のふたを開け、酸っぱいものを想像しながら5～10分位かけて唾液を口の中にためてもらい、容器に口を付けて直接採取してください。

(注意)
唾液が容器の外側につかないようにしてください

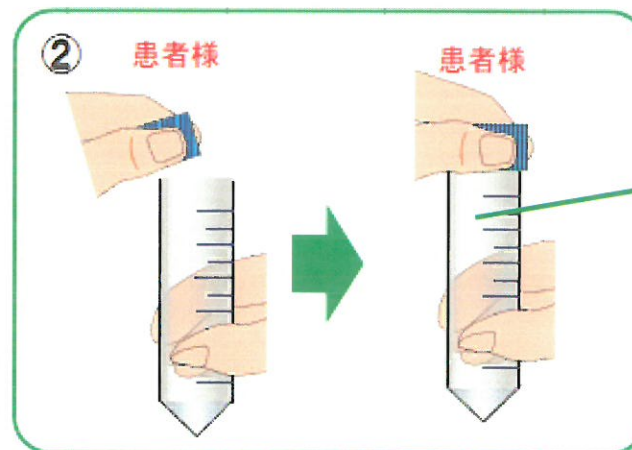

チャック付ポリ袋に入れる

ポリ袋のチャックも
しっかりと閉める

② 必要量(約1～2 ml)採取出来たら、容器のふたをしっかりと閉めて、チャック付ポリ袋に入れ提出してください(チャック付ポリ袋のチャックもしっかりと閉めてください)

キャップをしっかりと閉める